


medpro[®] MAXI & mini

BLUTZUCKER-MESSSYSTEM

1.



2.

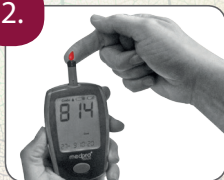


3.



1. Teststreifen ein-
setzen
2. Probenauftrag
ausführen
3. Ergebnis nach 5
Sekunden ablesen

SPEZIFIKATIONEN

Test	Glukose, plasma-äquivalente Kalibration
Methode	Amperometrisch, Enzym GDH-FAD
Hämatokritbereich	0 - 70 %
Probenentnahmestellen	Fingerbeere, bei professioneller Anwendung auch venöses, Shunt-Blut oder neonatales Blut
Probenvolumen	1,1 µL
Messdauer	5 Sekunden
Messbereich	0,6 – 33,3 mmol/L (10 – 600 mg/dL)
Arbeitstemperatur	10 - 40 °C (50 - 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	weniger als 85 %
PC-Anschluss	Auswertung mit Diabass möglich
optional	HCT-Anzeige

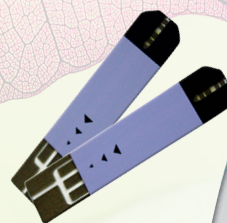

medpro[®] MAXI Starterset
 medpro[®] mini Starterset
 passende BZ-Teststreifen (25 Stk. einzeln verpackt)
 passende BZ-Teststreifen (2 x 25 Stk. in der Dose)
 medpro[®] MAXI&mini Kontrolllösung

PZN: 09233243
 PZN: 09233272
 PZN: 09233303
 PZN: 09300005
 PZN: 09233332

Online-Shop
medifuxx.de

MEDPRO GmbH • Hauptstraße 27 f • 23923 Lüdersdorf
 Tel.: 03 88 21-620 40 • Fax: 03 88 21-620 74 • Internet: www.medifuxx.de

MAXimini_Flyer_allgemein_11-05-2018_V9

medpro[®]
 MAXI & mini

medpro[®] MAXI & mini

- **Blutzucker-Bestimmung unter Berücksichtigung des Hämatokritwertes (HCT-Wert)**
- **Plasma-äquivalente Kalibration**
- **Anzeige bei zu geringer Blutmenge**
- **Maßeinheiten umstellbar**
- **Weiter Messbereich** bis in den tiefen Hypoglykämiebereich (10 - 600 mg/dL bzw. 0,6 - 33,3 mmol/L)
- **Präzision und Richtigkeit:** Aktuelle Rili-BÄK wird erfüllt, d.h. professioneller Einsatz in Klinik und Praxis möglich.
- Erfüllt die aktuelle EN ISO15197:2015
- **keine Codierung notwendig**
- Teststreifenauswurffunktion

Zwei Geräte - unendliche Möglichkeiten

Die Geräte arbeiten mit dem modernen GDH-FAD Teststreifen. Hier hat der Sauerstoffgehalt im Blut (nicht wie bei herkömmlichen GOD-Systemen) keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Abweichungen vom normalen Hämatokritwert führen bei vielen Blutzucker-Messsystemen zu Messfehlern, die bis zu 60 % betragen können. Dies ist bei diesem System, welches auch die Anfor-



derungen der aktuellen Richtlinie der Bundesärztekammer für Fachkreise erfüllt, ausgeschlossen.

Ein-Code-System: Kein Code-Wechsel notwendig.

Dieses System passt in Form des medpro[®] mini in jede Tasche und ist somit sowohl für die Nutzung zu Hause als auch für unterwegs bestens geeignet.