



*Schwanger?*

# Optimac® Schwangerschaftsfrühtest

Zur Eigenanwendung

hCG ist ein Hormon, welches kurz nach der Befruchtung der Eizelle von der Plazenta ausgeschüttet wird. Das Vorhandensein und der schnelle Anstieg der hCG-Konzentration im mütterlichen Urin ist ein definitiver Hinweis auf eine Schwangerschaft.

Dieser Test kann im Morgenurin bereits hCG-Konzentrationen nachweisen, wie sie wenige Tage nach der Befruchtung erreicht werden (sichere Nachweisgrenze 25 mIU/mL, oftmals schon ab 15 mIU/mL).

Das bedeutet, dass ein Schwangerschaftsnachweis bereits 2–3 Tage vor dem errechneten Termin der nächsten Regel möglich sein kann.



Inhalt: 1 Schwangerschaftsfrühtest,  
Gebrauchsanweisung  
PZN 01677383

Ansaugstab mit Reservoirkammern: Besseres Probensammeln = Vermeidung ungültiger Testergebnisse durch zu geringe Probenmenge!


Die hohe Empfindlichkeit des Tests ermöglicht oftmals schon den Nachweis von hCG ab 15 mIU/mL – somit 2-3 Tage vor der erwarteten Regel.



Mit glasklarem Fenster als Spritzschutz!

## Einfache Durchführung

- 1 Halten Sie den Ansaugstab für **5 Sekunden** in den Urinstrahl.
- 2 Warten Sie **5 Minuten**, lesen Sie dann das Ergebnis ab.

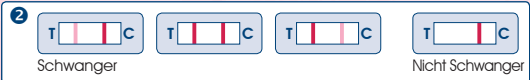

MEDPRO GmbH  
Hauptstraße 27 f · 23923 Lüdersdorf · Tel.: 038821 - 620 40



**medifuxx.de**  
Online-Shop für Blutzucker-Messgeräte,  
Teststreifen und vieles weitere für Diabetiker.